


●N95 レスピレーターは、清潔な場所で行ってください。

●本ガイドはハイラック 350 の装着のしかたを示したガイドです。製品の取り扱いについては、必ず製品に添付の取扱説明書をよくお読みください。


サカキ式 ハイラック 350 装着のしかた

①

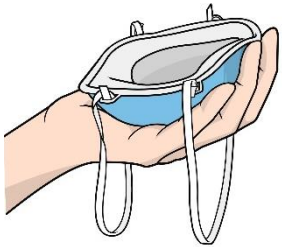

しめひもを2本とも手の甲側にまわし、レスピレーターの内側の接顔部の切れ込みのある部分を指の方にして持ちます。

②

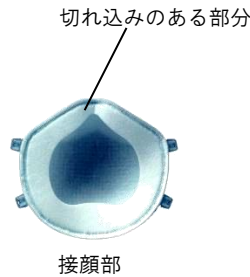

切れ込みのある部分を鼻根に当てるように顔につけます。

③



下側のしめひもを首の後ろにかけます。

④



上側のしめひもを頭上部にかけます。

⑤



上下左右に動かして、顔によくなじませてフィットさせてください。

しめひもの長さが合わない場合は、「しめひもの調節」にしたがってください。装着が完了したらユーザーシールチェックをしてください。

●ユーザーシールチェック（陽圧法）



レスピレーターと顔の間から空気の漏れがないかを調べ、正しく装着できているかを確認するために行います。
(装着の都度行ってください)

フィルター表面を手で覆って息を吐き、レスピレーターと顔の間から空気の漏れがなければ密着性は良好です。

空気の漏れが感じられればレスピレーターの位置を直すか、しめひもの調節を行ってください。


●しめひもの調節

締める場合



レスピレーターを装着したまま、しめひもの先端を引っ張ってください。

緩める場合

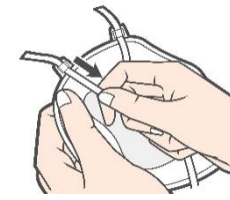


レスピレーターをはずして、図のように引っ張ってください。

サカキ式 ハイラック 350 はずしかた

下側のしめひもをはずす

①

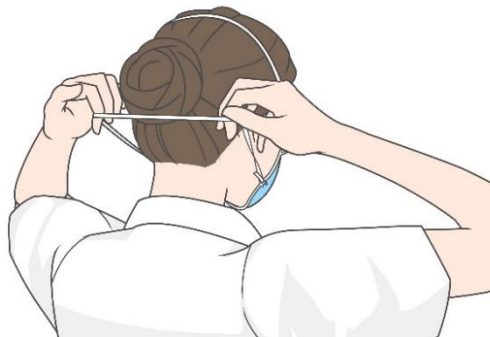

首の後ろにかかっている下側のしめひもに指をかけて持ち上げます。

②



持ち上げたしめひもを頭の上に持っていき、下側のしめひもをはずします。

⚠ 警告

●レスピレーターの表面を触らないように
はずしてください。

レスピレーターの表面にウイルス、細菌等の付着があった場合、二次感染の恐れがあります。


上側のしめひもをはずす / 表面を触らないように廃棄する

③



頭上部にかかっている上側のしめひもに指をかけて持ち上げます。

④

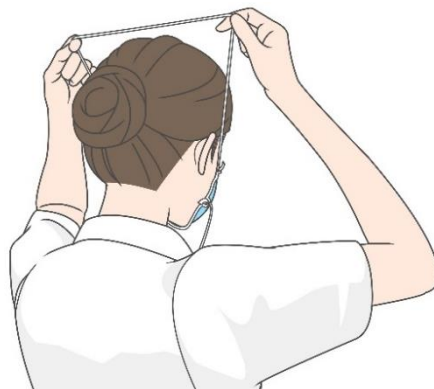

持ち上げた上側のしめひもを前に持っていき、はずします。

⑤



レスピレーターが顔から離れたら、フィルター表面を触らないようにしてレスピレーターを廃棄します。